

ジャスブランチ製品洗浄工程

No4

被洗物	マットレス専用機械でのピュアフラッピー[中材プレスエア] の洗浄・乾燥・殺菌	
被洗物	ピュアフラッピーの中材の重さ PZC-8391・9191=1.4kg PZ3WA-8391・9191=6.5kg	
工程	マットレス専用洗濯機を使う場合 一度に、8枚中材プレスエアーを投入	

工 程	水 位	温 度	時 間	投入タイミング・備考	工 程
洗 淨	中 水 位 25rpm	40 °C	10 分	ジャスクリーン(液体洗剤) 液体酵素 (次亜塩素200ppm)	↓
排 水			1 分		↓
脱 水 弱 脱 水	中 水 位 100rpm		2 分		↓
すすぎ①	高 水 位	3 0 °C	5 分		↓
排 水			1 分		↓
脱 水 高 速 脱 水	280rpm	常 温	10 分	→洗浄工程終了	↓
洗浄済マットレス乾燥機に設置					↓
乾燥機・殺菌		湿 熱 殺 菌 80 °C	15 分	乾燥工程終了	↓
梱 包	ビニール袋に梱包				完了

- ・ 一連の工程により殺菌・消毒効果があります。
- ・ **次亜塩素は十分に濯ぎをして下さい。**
- ・ **次亜塩素が残ってしまうと、中材プレスエアーの接地面に剥離の恐れがあります。**
- ・ 注意 同プレスエアーに荷重をかけて熱を加えると反発力が低下する場合があります。
- ・ 注意 同プレスエアーは折り曲げて熱を加えると変形する場合があります。

※次亜塩素酸ナトリウムは100ppm～200ppmで殺菌効果は得られます。

株式会社ジャスブランチ
排泄・寝具情報館 ブランチ・ケア